

کیت UltraDent که محصول سفید کننده برقی آفیس است یک ژل فعال شده شیمیایی است که پس از حدود یک ساعت می تواند دندان هایی سفید و زیبا را برای تان به ارمغان بیاورد. در این محصول، ژل پراکسید هیدروژن قدرتمند 40 درصد از نظر شیمیایی فعال می شود، بنابراین برای کار کردن به نور داغ و ناراحت کننده نیاز ندارد.

معرفی کیت بلیچینگ مطب 40 UltraDent %

بلیچینگ مطب 40٪ اوپال سنس UltraDent-Boost محصول کشور آمریکا، یک ژل فعال شیمیایی است.

بلیچینگ مطب 40٪ اوپال سنس UltraDent-Boost با اکتیواسیون شیمیایی، بدون نیاز به لایت کیور که به شما امکان می دهد فقط در یک جلسه 20 دقیقه ای به نتیجه ای فوق العاده و باورنکردنی برسید.

در بسته بندی 4 سرنگی این این محصول تمام مواد مورد نیاز شما را فراهم خواهد کرد.



ویژگی های کیت UltraDent

- ✓ حاوی نیترات پتاسیم و فلوراید ✓ از نظر شیمیایی فعال می شود، بنابراین نیازی به نور ندارد
- ✓ ضد پخش شدن ✓ حاوی ژل پراکسید هیدروژن 40%
- ✓ عدم نیاز به یخچال قبل از مخلوط شدن ✓ وگان - بدون محصولات حیوانی
- ✓ سفید کردن حرفه ای دندان با نتایج فوری ✓ دارای گواهی بدون گلوتن

ژل سفید کننده دندان Opalescence Boost برنده جایزه بهترین راه برای سفید کردن سریع دندان ها است. تنها با دو یا سه درمان 20 دقیقه ای فرمول قدرتمند پراکسید هیدروژن 40 درصد آن نتایج قابل توجهی را ارائه می دهد. این برای افرادی که به دنبال راه حل های سریع هستند و یا لکه های سرسختی روی دندان خود دارند، می تواند مفید باشد.

مزایای کیت UltraDent

برخی از روش های سفید کننده در مطب به نور یا لیزر برای "فعال کردن" عامل سفید کننده شیمیایی متکی هستند. با این حال، سفید کننده Opalescence Boost در مطب تنها به فعال سازی شیمیایی متکی است.

ژل سفید کننده دندان fhOpalescence Boost ترکیب نوآورانه مخلوط سرنگ دوگانه و ژل سفید کننده دندان، نتیجه ای منحصر به فرد و تضمینی ارائه می دهد. از آنجایی که ژل از نظر شیمیایی فعال می شود، قبل از مخلوط کردن، نیازی به نگهداری در یخچال نیست.

پس از مخلوط شدن، ژل سفید کننده دندان Opalescence Boost به راحتی با استفاده از نوک Black Mini™ استفاده می شود. فرمول ویسکوزیته ضخیم آن از پخش شدن ژل جلوگیری می کند و رنگ قرمز قابل توجه آن باعث می شود که به راحتی قابل مشاهده باشد تا به قرارگیری دقیق و حذف کامل کمک کند. ژل سفید کننده Opalescence Boost نیز با حداقل 20 درصد آب فرموله شده است که به جلوگیری از کم آبی بدن کمک می کند و راحتی و رضایت بیمار را به حداکثر می رساند.

به نقل از وبسایت www.ultradent.com

میزان ماندگاری اثر سفیدکنندگی این کیت بدین صورت است که به عادات و سبک زندگی فرد بستگی دارد و نیاز نیست از این بابت نگران باشید زیرا ماندگاری به نسبت خوبی دارد.

Teeth whitening results are very stable, but depending on the patient's nutrition and lifestyle habits, the procedure may need to be redone periodically. Due to the safety of the teeth whitening agents, this should not concern the dentist or patient.

مشخصات تکنیکال کیت UltraDent

بدون نیاز به نور

مطالعات ثابت کرده اند که بهترین نتایج سفید کننده در مطب نیازی به نور ندارد. به همین دلیل است که سفید کننده Opalescence Boost با استفاده از روش های شیمیایی برای سفید کردن دندان، مورد توجه دندان پزشکان قرار گرفته است.

نتایج فوری

کیت UltraDent برای افرادی که به دنبال نتایج فوری هستند یا کسانی که رویداد مهمی را در پیش داشته و فرصت چندانی ندارند، انتخابی عالی است.

محصول نوآورانه

کیت UltraDent از یک روش منحصر به فرد مخلوط کردن سرنگ به سرنگ برای اطمینان از حداکثر استحکام ممکن استفاده می کند. هنگامی که ژل مخلوط شد، سفید کننده Opalescence Boost به راحتی از طریق نوک Micro 20 ga FX™ روی دندان ها اعمال می شود. این نوک مخصوص طراحی شده دارای الیاف در انتهای آن است تا امکان تحویل سریع، آسان و دقیق را فراهم کند. نوک Black Mini™ یا نوک Micro 20 ga نیز گزینه های مناسبی برای کاربرد ژل Opalescence Boost هستند.

فرمول قدرتمند

سفید کننده Opalescence Boost با فرمول قدرتمند پراکسید هیدروژن 40٪ خود می تواند نتایج سفید کننده قابل توجهی را در حدود یک ساعت ارائه دهد. به دلیل غلظت قوی، سفید کننده Opalescence Boost فقط توسط یک متخصص دندانپزشک انجام می شود.

رنگ قرمز متمایز

رنگ قابل توجه سفید کننده Opalescence Boost باعث می شود که به راحتی دیده شود که در هنگام قرار دادن و برداشتن کمک می کند.

پایداری برتر

محصولات سفید کننده Opalescence™ یکی از پایدارترین محصولات سفید کننده در صنعت هستند که تقریباً تمام اثربخشی خود را در طول عمر مفید خود حفظ می کنند. با در نظر گرفتن زمان حمل و نقل فرموله شده اند، بنابراین حتی پس از ارسال به سراسر کشور پایدار می مانند. در واقع، مطالعات پایدار انجام شده بر روی ژل های سفید کننده دندان Opalescence نشان داده است که قدرت پراکسید در پایان عمر مفید محصول به طور مداوم 90٪ یا بیشتر است.

فرموله شده با محتوای آب بالا

بسیاری از محصولات سفید کننده موجود در بازار، دندان ها را کم آب می کند و در نتیجه حساسیت ناراحت کننده ای برای بیماران ایجاد خواهد کرد. سفید کننده Opalescence Boost با محتوای آب بالا فرموله شده است تا دندان ها را در طول فرآیند سفید کردن هیدراته نگه دارد. این محتوای آب بالا، بازگشت سایه و کم آبی را کاهش می دهد تا رضایت بیمار را به حداکثر برساند.

فاقد گلوتن

محصولات سفید کننده Opalescence فاقد گلوتن و دارای تاییدیه کوشر هستند.

PH کاملاً متعادل

از آنجایی که ژل سفید کننده دندان می تواند هر بار چند ساعت در دهان بماند، استفاده از محصولی با pH که دقیقاً با pH طبیعی بزاق بیمار مطابقت دارد، مهم است. سفید کننده Opalescence Boost حاوی بافرهای اضافه شده برای کمک به حفظ سطح pH خنثی است، بنابراین هرگز اسیدی نیست. سفید کننده Opalescence Boost به طور خاص با در نظر گرفتن تجربه بیمار فرموله شده است.

این محصول به طور مستقیم فقط به متخصصان دندانپزشکی دارای مجوز فروخته می شود.

Ultradent Products، Inc. متعهد به حمایت از جامعه دندانپزشکی است. از آنجایی که سفید کردن دندان با نظارت دندانپزشک بیشترین موفقیت را دارد، سفید کردن اوپالسنس مستقیماً فقط به متخصصان دندانپزشکی دارای مجوز فروخته می شود. برای دندانپزشکان مهم است که اطمینان حاصل کنند که بیمارانشان روش سفید کردن را درک می کنند، انتظارات واقع بینانه از نتیجه و تجربه لذت بخشی دارند تا از نتیجه نهایی راضی باشند.

به راحتی با سایر محصولات سفید کننده Opalescence برای درمان های سفارشی ترکیب می شود.

در حالی که هر محصول سفید کننده Opalescence در یک رژیم سفید کننده مستقل موثر است، بسیاری از بیماران ترجیح می دهند ترکیبی از درمان ها یا محصولات برای رفع نیازهای خود استفاده کنند. از آنجایی که هر محصول سفید کننده Opalescence در ترکیب با سایر محصولات کار می کند، ایجاد یک رژیم سفارشی برای هر بیمار آسان است.

Opalescence Boost یک ژل سفید کننده قدرتی فعال شده شیمیایی است که تنها پس از 40 دقیقه روی صندلی دندانپزشکی، دندان های روشن تر و سفیدتری را ارائه می دهد. ژل پراکسید هیدروژن قدرتمند 40 درصد از نظر شیمیایی فعال می شود، بنابراین برای کار کردن به نور داغ و ناراحت کننده نیاز ندارد. با استفاده از پیکربندی منحصربه فرد دو سرنگ، پزشک فرمول پراکسید هیدروژن 40٪ را درست قبل از استفاده فعال می کند و اطمینان حاصل می کند که هر دوز Opalescence Boost تازه و موثر است.



نحوه استفاده از کیت UltraDent

مرحله 1: قبل از استفاده، سرنگ ها را از یخچال خارج کنید و قبل از مخلوط کردن دو ماده شیمیایی با هم، اجازه دهید محتویات به دمای اتاق برسد. قبل از ادامه، مطمئن شوید که سرنگ های قرمز و شفاف به طور ایمن به هم وصل شده اند. عینک و لباس محافظ روی خود و بیمار قرار دهید. قبل از مخلوط کردن، بررسی کنید که سرنگ ها به طور ایمن وصل شده باشند. پیستون سرنگ قرمز را به داخل فشار دهید و تمام محتویات آن را به داخل سرنگ شفاف فشار دهید. ساقه شفاف کوچک را به شدت به ساقه شفاف بزرگتر فشار دهید. سپس پیستون شفاف را به طور کامل داخل سرنگ قرمز فشار دهید. برای فعال کردن، ماده شیمیایی سرنگ قرمز را با انگشت شست به داخل سرنگ شفاف فشار دهید. عمل را معکوس کنید و حداقل 25 بار در هر طرف مخلوط کنید.

مرحله 2: تمام ژل مخلوط شده را داخل سرنگ قرمز فشار دهید. دو سرنگ را جدا کرده و نوک Micro 20ga FX® را روی سرنگ قرمز رنگ وصل کنید. قبل از استفاده از داخل دهان، جریان را روی یک گاز پنبه ای یا پد مخلوط کن بررسی کنید. اگر مقاومت برآورده شد، نوک را عوض کنید و جریان را دوباره بررسی کنید.

مرحله 3 IsoBlock™ Ultradent: و جمع کننده های پلاستیکی خود را قرار دهید. دندان ها را کاملاً بشویید و با هوا خشک کنید.

مرحله 4: یک نوک Micro 20ga را با احتیاط به OpalDam®Green وصل کنید و جریان را بررسی کنید. یک مهره پیوسته را در امتداد لبه لثه که تقریباً 0.5 میلی متر روی مینای دندان همپوشانی دارد، بگیرید.

مرحله 5: با استفاده از یک حرکت اسکن، مایع رزین OpalDam Green را به مدت 20 ثانیه در هر قوس روشن کنید. پخت رزین را با یک ابزار به دقت بررسی کنید.

مرحله 6: لایه ای به ضخامت 0.5 تا 1.0 میلی متر از Opalescence Boost را به میزان 40٪ روی سطح لبی دندان و کمی روی سطوح انسیزال/اکلوزال بمالید. اجازه دهید ژل به مدت 20 دقیقه روی دندان بماند.

مرحله 7: مراحل 6-7 را یک یا دو بار تکرار کنید تا به نتایج دلخواه برسید.

مرحله 8: پس از اتمام کاربرد نهایی و حذف تمام ژل های قابل رویت، دندان ها را کاملاً بشویید.

مرحله 9: به آرامی نوک ابزار دندانپزشکی را زیر OpalDam Green بکشید و آن را بلند کنید. هر گونه باقیمانده بین پروگزیمال را بررسی کرده و حذف کنید.

مرحله 10: تغییر سایه را ارزیابی کنید. اگر سفید کردن اضافی مورد نظر است و حساسیت قابل توجهی مشاهده نشد، می توانید محصول جانبی برای استفاده در منزل را نیز به فرد ارائه دهید.

تاریخچه ULTRADENT

در سال 1976، دکتر دن فیشر نیاز محصولی را یافت که به قطع خونریزی سریع تر و عمیق تر کمک کند، بنابراین راه حل پیشگامانه Astringedent ارائه گردید. موفقیت Hemostatic Astringedent منجر به راه حل های پیشرفته و نوآورانه دندان پزشکی شد و محصولات اولترادنت تولید شد. از زمانی که این شرکت برای اولین بار در سال 1979 فعالیت تولیدی خود را در جنوب اردن، یوتا آغاز کرد تا به امروز در 9 کشور دارای زیرمجموعه است و در بیش از 125 کشور جهان محصولات خود را به فروش می رساند.

بسته بندی ULTRADENT

بسته بندی INTRO KIT شامل 4 سرنگ، 2 بیمار، 4 فک:

- 4 عدد سرنگ اکتیوایتور سفید رنگ و 4 عدد سرنگ قرمز رنگ مواد بیلچینگ که با یکدیگر در ابتدا ادغام می شود و 4 سرنگ قرمز رنگ بوست بدست می آید 2/1 میلی لیتر حجم سرنگ
- 2 سرنگ سبز رنگ بنام OpalDam جهت محافظ لثه که باید کیور شود حجم 2/1 میلی لیتر
- دو عدد ISO BLOCK که جهت نگه داشتن زبان بیمار مورد استفاده است
- 2 عدد راهنمای شید رنگ جهت تشخیص رنگ دندان بیمار
- دو عدد وکیوم آدپتور جهت اتصال به ساکشن دستگاه یونیت و جمع کردن ماده بیلچینگ است
- 20 عدد نوک های برس دار مخصوص قراردادن بیلچینگ بر دندان بیمار
- 2 عدد نوک
- 2 عدد تیپ SST

کیت های تک بیمار Patient Kit بلیچینگ آفیس بوست 40 درصد هیدروژن پروکساید شامل موارد ذیل میشوند:

- 2سرنگ اکتیوایتر بوست
- 1سرنگ OpalDam
- 1 عدد زبان گیر Iso block
- 1 عدد شید رنگ
- 10 عدد نوک

قیمت کیت بلیچینگ مطب 40 UltraDent %

عوامل مختلفی بر میزان قیمت اولترادنت بلیچینگ تاثیر دارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

برند و شرکت تولید کننده: شرکت و برندهای مطرح در این زمینه معمولاً قیمت بالاتری دارند.

کیفیت مواد مصرفی: هرچه میزان کیفیت مواد ساخت بلیچینگ اولترادنت بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش پیدا می کند.

تعداد دندان: قیمت بلیچینگ اولترادنت آفیس به ازای هر دندان بالاتر می رود.

محیط جغرافیایی: قیمت این محصول در هر شهر و کشور، با توجه به قیمت ارز و هزینه باربری متفاوت است.

اگر قصد خرید این محصول با بهترین کیفیت را دارید می توانید به وبسایت رایکا دنتال مراجعه کنید. این فروشگاه مرجع لوازم دندان پزشکی با بهترین کیفیت و قیمت است.

قیمت بلیچینگ آفیس اولترادنت در حال حاضر در این وبسایت 1,500,00 هزار تومان است. در صورتی که قبل از خرید نیاز به مشاوره داشتید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

خرید کیت بلیچینگ مطب 40 UltraDent %

جهت خرید مواد سفید کننده دندان یعنی بلیچینگ آفیس اولترادنت می توانید به فروشگاههای تخصصی فروش لوازم دندان پزشکی مراجعه کنید و یا از فروشگاههای آنلاین در این زمینه خریداری نمایید. برای خرید بلیچینگ دندان پزشکی به چند نکته توجه داشته باشید.

معتبر بودن فروشگاه: اطمینان حاصل کنید از فروشگاه معتبری محصول مورد نظر را خریداری می کنید و محصول کیفیت مطلوبی نیز دارد.

تاریخ انقضا: هر محصولی انقضای مشخصی دارد و اگر از تاریخ آن بگذرد دیگر قابل استفاده نیست و می تواند عوارض جبران ناپذیری داشته باشد.

برند محصول: از برندهای مشهور و شناخته شده بلیچینگ اولترادنت خریداری کنید زیرا این امر می تواند تاثیر زیادی در کیفیت آن داشته باشد.

با توجه و رعایت این نکات می توانید تجربه خرید خوبی داشته باشید.

یکی از فروشگاه های معتبر در زمینه تجهیزات و لوازم دندان پزشکی رایکا دنتال است. قیمت بلیچینگ اولترادنت افس در این فروشگاه قیمت مناسبی دارد. می توانید با مراجعه به وب سایت رایکا دنتال با اطمینان از اصالت کالا محصولات مورد نظر خود را سفارش دهید و در کوتاه ترین زمان ممکن آنها را دریافت نمایید.

خرید کیت بلیچینگ مطب 40 UltraDent %در کرج

اگر در شهر کرج زندگی می کنید و به دنبال خرید کیت بلیچینگ اولترادنت هستید اما مکان مناسبی را پیدا نکرده اید، فروشگاه رایکا دنتال آماده است تا به شما به دو صورت حضوری و آنلاین خدمت رسانی کند. حتی اگر در شهر دیگری سکونت دارید، نگران نباشید زیرا سایت رایکا دنتال محصولات دندان پزشکی را به سراسر کشور ارسال می کند. شما می توانید با اطمینان از اصل بودن محصولات، بلیچینگ دندان و سایر تجهیزات دندان پزشکی نظیر هندپیس، کامپوزیت، آلژینات بایر و غیره را به راحتی سفارش دهید. در کمترین زمان ممکن (حداکثر 24 ساعت) محصولات به آدرس مورد نظر شما ارسال می شوند.

برای دانلود pdf این مطلب کلیک کنید.