

کیت بلیچینگ **white smile** یکی از محصولاتی است که می توان از آن برای سفید کردن دندان ها استفاده کرد. با استفاده از روش بلیچینگ می توان تنها رنگ دندان را تغییر داد و در فرم دندان ها تغییری به وجود نخواهد آمد. رنگ دندان نیز چند درجه روشن تر خواهد شد. کیت بلیچینگ **white smile** مدل آفیس از جمله بهترین گزینه هایی است که می توانید برای سفید کردن دندان خود از آن استفاده نمایید.

کیت بلیچینگ **white smile**

بلیچینگ **white smile** با 40 درصد پراکسید هیدروژن (مخلوط 32 درصد) برای سفید کردن پزشکی دندان های تغییر رنگ داده بسیار مفید است. دلایل مختلفی برای تغییر رنگ دندان وجود دارد که می تواند شامل، بیماری، آسیب، درمان های پزشکی یا نفوذ بیش از حد مواد رنگی باشد. این موارد نیاز به اقدامات پزشکی خاص برای بازگرداندن ظاهر دندان ها دارد **POWER WHITENING YF** را می توان برای سفید کردن یک یا چند دندان یا بخش هایی از یک دندان، از جمله بلیچینگ وایت اسمایل تک بیمار داخل تاجی دندان و یا قسمت های غیر حیاتی ریشه استفاده کرد.

به نقل از وبسایت www.whitesmile.com

The application is only allowed in the dentist's office with a medical indication for patients older than 18 years of age.

استفاده از این محصول فقط در مطب دندانپزشکی دارای مجوز و برای بیماران بالای 18 سال مجاز است.



محتویات کیت بلیچینگ white smile

- ژل POWER WHITENING YF در سرنگ های 2.5 میلی لیتری دو محفظه ای
- محافظ لثه، نورگیر، در سرنگ های 3 گرمی
- موس پس از سفید شدن برای حساسیت زدایی و معدنی سازی مجدد با طعم میوه ای در سرنگ های 3 میلی لیتری
- جمع کننده لب با محافظ زبان

محتویات کیت تک بیماره:

- یک سرنگ ۲،۵ میل ۴۰٪
- یک پروتکتور لثه ۱،۵ گرم
- یک عدد سرنگ ۱،۲ میل ضد حساسیت

محتویات کیت دو بیماره:

- دو سرنگ ۲،۵ میل ۴۰٪
- یک پروتکتور لثه ۳ گرم
- یک عدد سرنگ ۳ میل ضد حساسیت.

مشخصات کیت بلیچینگ white smile

| | |
|---|---|
| نام محصول <input checked="" type="checkbox"/> | بلیچینگ <input checked="" type="checkbox"/> |
| مدل <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> POWER WHITENING |
| برند <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> White Smile وایت اسمایل |
| نوع <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> مطب Office |
| درصد <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 40% |
| نوع ژل <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> هیدروژن پروکساید |
| کشور سازنده <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> آلمان |
| عملکرد <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> شیمیایی |



آفیس بلیچینگ چیست؟

آفیس بلیچینگ (In-Office Teeth Whitening) یا سفید کردن دندان که در مطب و توسط دندان پزشک انجام می‌شود. متخصص به صورت کاملا ایمن و با کمک تجهیزات تخصصی، دندان‌های مراجعه کنندگان را سفید می‌کند.

تفاوت این روش با هوم بلیچینگ در نوع تجهیزات بکار رفته و غلظت مواد سفید کننده دندان است.

با روش آفیس طی یک تا دو جلسه، دندان‌ها سفید می‌شوند، اما در روش هوم، باید به مدت حداقل چند هفته از این مواد برای سفید شدن دندان‌ها استفاده کرد.

بلیچینگ آفیس (وایت اسمایل) ، درمانی است که برای برطرف کردن تیرگی ها و رنگدانه هایی که به مرور زمان و بر اثر مواد رنگدانه دار مانند چای، قهوه، توت فرنگی و حتی گوجه فرنگی ایجاد می شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بلیچینگ وایت اسمایل تک بیمارحتی برخی از بد رنگی های ژنتیکی دندان را نیز برطرف می کند و ظاهر دندان ها را زیباتر می‌سازد.

افزایش سن و عادت های غذا خوردن و عادت های روزانه مانند سیگار کشیدن، خوردن نوشابه های رنگی و ادویه ها هم می تواند موجب تغییر رنگ دندان ها شود.

بلیچینگ آفیس (white smile) با ۴۰٪ پراکسید هیدروژن (۳۲٪ مخلوط) برای سفید کردن دندان های شما بسیار مناسب می باشد.

بلیچینگ white smile یکی از پرمصرف ترین محصولات در زمینه زیبایی دندان در ایران می باشد که از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

ویژگی های کیت بلیچینگ white smile

از این محصول می توان برای بزرگسالان بالای 18 سال استفاده کرد. ویژگی های آن نیز شامل موارد زیر می شود.

| | |
|---------------------------|--|
| کیفیت بالا | تاثیر فوق العاده و سریع |
| استفاده آسان | نوع عملکرد شیمیایی بدون نیاز به دستگاه بلیچینگ |
| دارای ژل هیدروژن پروکساید | ۴۰ درصد |

تفاوت بلیچینگ آفیس با بلیچینگ هوم

تفاوت بلیچینگ هوم و آفیس در این است که با استفاده از بلیچینگ آفیس دندان پزشک می تواند در طی 1-2 جلسه دندان ها را به میزانی که نیاز است سفید یا بلیچ نماید. ولی این مورد برای بلیچینگ هوم و مصارف خانگی نیاز به بیشتر از دو هفته زمان دارد.

هر دو گزینه سفید کننده دندان، از مواد سفید کننده مبتنی بر پراکسید استفاده می کنند. محصولات خانگی حاوی 3 تا 20 درصد پراکسید (کاربامید یا پراکسید هیدروژن) هستند. محصولات آفیس حاوی 15% تا 43% پراکسید هستند.

به طور کلی، هر چه مدت طولانی تری محلول قوی تری روی دندان های خود نگه دارید، دندان های شما سفیدتر می شوند. با این حال، هر چه درصد پراکسید در محلول سفید کننده بیشتر باشد، باید کوتاهتر آن را روی دندان ها اعمال کرد. ماندن ژل برای مدت طولانی تری باعث کم آبی دندان و افزایش حساسیت دندان می شود.

هر گزینه مزایا و معایبی دارد، اما قبل از اینکه کیت های بلیچینگ دندان را در خانه امتحان کنید، حتما با دندان پزشک خود صحبت کنید. زیرا تمام افراد از آن نتایج خوبی نخواهند دید. بلیچینگ روکش های چینی یا باندینگ های کامپوزیت رنگ دندان را سفید نمی کند.

سفید کردن دندان ها توسط دندان پزشک شما می تواند دندان ها را سریع تر روشن کند. محلول سفید کننده معمولاً بسیار قوی تر از کیت های خانگی است. همچنین، گرما، نور یا ترکیبی از این دو ممکن است جهت تسریع و تشدید فرآیند سفید شدن استفاده شود.

با استفاده از محصولات آفیس دندان ها معمولاً سه تا هشت درجه روشن تر می شوند و معمولاً چندین ویزیت در مطب به مدت 30 تا 60 دقیقه ای طول می کشد. برخی از دندان پزشکان از تکنیک هایی استفاده می کنند که می توانند در یک جلسه 2 ساعته این فرآیند را انجام دهند. (مانند سیستم زوم).

گزینه های بلیچینگ دندان در منزل

انتخاب های زیادی برای بلیچینگ دندان در خانه وجود دارد که رایج ترین آنها عبارتند از:

نوارها و ژل های سفید کننده دندان. این محصولات سفید کننده دندان بر پایه پراکسید که مستقیماً با یک برس یا نوار نازک روی دندان ها اعمال می شوند، معمولاً باید یک یا دو بار در روز به مدت 10 تا 14 روز استفاده شوند.

سیستم های بلیچینگ دندان مبتنی بر سینی. با استفاده از این گزینه سفید کننده دندان، سینی محافظ دهان با ژل یا خمیر سفید کننده مبتنی بر پراکسید پر می شود و به مدت یک تا چند ساعت در روز تا چهار هفته روی دندان ها قرار می گیرد.

خمیردندان های سفید کننده دندان. از آنجایی که خمیردندان ها ساینده کمتری دارند می توانند تا حدودی برای سفید کردن موثر واقع شوند.

خمیردندان های سفید کننده، با این حال، حاوی مواد شیمیایی یا مواد صیقل دهنده هستند که به پاک کردن لکه ها از روی دندان ها بدون کمک عامل سفید کننده کمک خواهند کرد. خمیردندان های سفید کننده نسبتاً ارزان هستند و دندان ها را تقریباً یک درجه روشن می کنند. برخی از خمیردندان های سفید کننده حاوی پراکسید هستند، اما به اندازه کافی روی دندان ها باقی نمی ماند تا مزایای سفید کنندگی داشته باشند.

چه از سیستم سفید کننده دندان در منزل استفاده کنید و چه دندان های خود را توسط دندان پزشک سفید کنید، می توانید با مسواک زدن، نخ دندان کشیدن و شستشوی روزانه به حفظ سفید ماندن دندان های خود کمک کنید. همچنین از مصرف غذاها و نوشیدنی های اسیدی و غنی از تانن باید خودداری کنید که شامل موارد زیر می شوند.

- چای سیاه و قهوه
- نوشیدنی های ورزشی
- نوشابه های گازدار (نوشابه های گازدار تیره و روشن)
- انواع توت ها و سایر غذاهای با رنگ قوی
- سس (سویا، گوجه فرنگی، کاری)

چرا بهتر است از محصولات آفیس برای سفید کردن دندان استفاده شود؟

بلیچینگ دندان می تواند دندان ها را به طور موقت حساس کند. یا برای افرادی که قبلاً دندان های حساسی دارند ناراحت کننده باشد. حتی در صورت استفاده نادرست، کیت های خانگی می توانند منجر به سوختگی لثه ها شود.

سفید کردن دندان برای افرادی که دندان های زرد دارند بهترین کارایی را دارد و برای افرادی که دندان های قهوه ای دارند کمتر موثر است. اگر دندان های شما خاکستری یا بنفش است، بلیچینگ دندان احتمالاً اصلاً کارساز نخواهد بود.

برای اینکه مطمئن شوید که سفید کردن دندان ارزش وقت و هزینه شما را دارد، قبل از استفاده از کیت سفید کننده دندان بدون نسخه با دندان‌پزشک خود صحبت کنید.

قیمت بلیچینگ white smile

عوامل مختلفی در تعیین قیمت آفیس بلیچینگ موثر هستند. برخی از این عوامل عبارتند از: **کیفیت مواد ساخت**: کیفیت و نوع مواد بلیچینگ از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت آن است. مواد با کیفیت بالاتر ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند.

تعداد دندان: بسته به تعداد دندان بلیچینگ صورت می‌گیرد هر چه تعداد دندان بیشتر باشد بر قیمت بلیچینگ نیز تاثیر می‌گذارد.

برند و شرکت تولیدکننده: محصولات از برندهای محبوب و شناخته شده ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند.

موقعیت جغرافیایی: قیمت این محصول در هر شهر و کشور با توجه به نرخ ارز، هزینه‌های گمرک و باربری متفاوت است. هر یک از این عوامل می‌توانند در تعیین قیمت نهایی بلیچینگ تاثیر داشته باشند. فروشگاه رایکا دنتال یکی از فروشگاه‌های معتبر در زمینه تجهیزات دندان پزشکی است. قیمت این محصول در حال حاضر در وبسایت رایکا دنتال بین 1.850.000 و 3.600.00 تومان متغیر است.

می‌توانید جهت دریافت مشاوره و اطلاع از تخفیف‌ها با ما در تماس باشید.

خرید بلیچینگ white smile در کرج

اگر به دنبال خرید بلیچینگ وایت اسمایل در شهرهای تهران یا کرج هستید، بهترین گزینه برای شما فروشگاه تجهیزات دندان پزشکی رایکا دنتال است. این فروشگاه ارائه دهنده بلیچینگ دندان با قیمتی مناسب است. شما می‌توانید به شعب حضوری این فروشگاه در کرج مراجعه کنید و با کمک مشاوران، اطلاعات دقیقی در خصوص خرید این محصول دریافت کنید. همچنین، این فروشگاه امکان خرید آنلاین را نیز فراهم کرده است. با اضافه کردن محصول به سبد خرید و ثبت سفارش نهایی، می‌توانید به سرعت و به راحتی محصول مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنید.

خرید بلیچینگ white smile

برای خرید بلیچینگ وایت اسمایل، می‌توانید به مراکز دندان پزشکی، فروشگاه‌های تخصصی تجهیزات دندان، یا فروشگاه‌های آنلاین معتبر که محصولات دندان پزشکی عرضه می‌کنند، مراجعه نمایید. قبل از خرید، اطمینان حاصل کنید که از یک منبع معتبر و با اعتبار محصول مورد نظر خود را خریداری می‌کنید.

همچنین، از نظرات کاربران و توصیه‌های دندان‌پزشکان در انتخاب محصول مناسب غافل نباشید. یکی از فروشگاه‌های معتبر در این زمینه فروشگاه رایکا دنتال است. قیمت آفیس بلیچینگ در این وبسایت بسیار مناسب است. می‌توانید به دو صورت حضوری و آنلاین از این فروشگاه لوازم و تجهیزات دندان پزشکی را خریداری کنید.

برای دانلود **pdf** این مطلب کلیک کنید.